


MICRONAUT-STAPH

Identifizierungssystem zum Nachweis von klinisch relevanten Staphylokokken innerhalb von 6 oder 18-24 Stunden

- ▼ Testung von 21 biochemischen Reaktionen (chromogene Substrate, Decarboxylasen, klassische Reaktionen und Fermentationen)
- ▼ Ergebnis schon nach 6 h (Schnellidentifizierung) oder 18-24 h (Übernachtidentifizierung)
- ▼ 21 verschiedene Taxa sind in der Datenbank enthalten
- ▼ Standardisiertes Verfahren
- ▼ Optimierte softwaregesteuerte Ablesung und Auswertung
- ▼ Die MICRONAUT-STAPH Platten sind ab Produktion 24 Monate bei 15-25 °C haltbar
- ▼ Eine Packung enthält 40 x 4 Tests, 1l NaCl sowie perforierte Abklebefolien

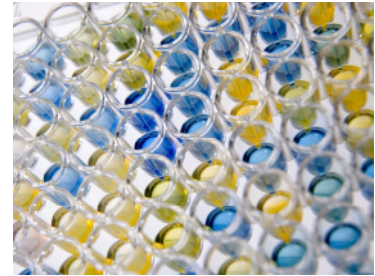

Taxa-Liste

<i>Micrococcus luteus</i>	<i>Staphylococcus intermedius</i>
<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Staphylococcus kloosii</i>
<i>Staphylococcus capitis</i> subsp. <i>capitis</i>	<i>Staphylococcus lentus</i>
<i>Staphylococcus chromogenes</i>	<i>Staphylococcus lugdunensis</i>
<i>Staphylococcus cohnii</i> subsp. <i>Cohnii</i>	<i>Staphylococcus saprophyticus</i> subsp. <i>Saprophyticus</i>
<i>Staphylococcus cohnii</i> subsp. <i>urealyticum</i>	
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	<i>Staphylococcus schleiferi</i>
<i>Staphylococcus gallinarum</i>	<i>Staphylococcus sciuri</i>
<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	<i>Staphylococcus simulans</i>
<i>Staphylococcus hominis</i>	<i>Staphylococcus warneri</i>
<i>Staphylococcus hyicus</i>	<i>Staphylococcus xylosum</i>

MICRONAUT-STAPH Kurzanleitung

Probenvorbereitung

MCN Software Methode wählen:
für **6 h** Inkubation Test „**C3**“ eingeben
für **18 - 24 h** Inkubation Test „**D1**“ eingeben
unter Taxon Code: β -Hämolysse +/- eingeben

Staphylokokken von Blutagar ohne Zusätze

Herstellung des Inokulums

McFarland in 5 ml NaCl:
für **6 h** Inkubation McFarland **2**
für **18 - 24 h** Inkubation McFarland **0,5**

Beimpfung

Suspension in 4-Kanal-Reservoir überführen

Je 100 μ l in jede Vertiefung des Tests

Zugabe von 2 Tropfen Paraffinöl

Versiegelung und Inkubation


„MICRONAUT“ Folie (perforiert)

Inkubation bei 35-37°C
6 h **oder** 18 - 24 h
(gemäß der gewählten Methode)

Ablesung

Messung mit dem Photometer

MICRONAUT-STAPH 4 Test/Platte

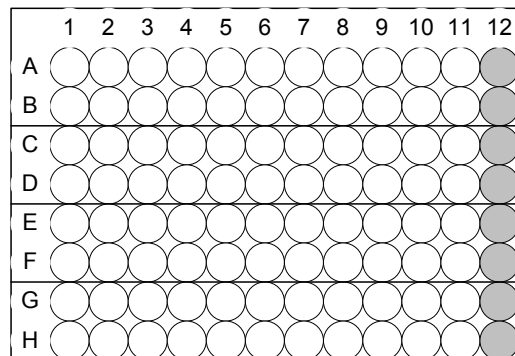

● Paraffinöl
A-H 12