

MICRONAUT-STREP

Identifizierungssystem zum Nachweis von Streptokokken und Enterokokken innerhalb von 20 - 24 h



- ✓ Testung von 24 biochemischen Reaktionen (chromogene Substrate, Decarboxylasen, klassische Reaktionen und Fermentationen)
- ✓ Ergebnisse nach 20 - 24 h (Übernachtidentifizierung), ohne Reagenzienzugabe
- ✓ 29 verschiedene Taxa sind in der Datenbank enthalten
- ✓ Standardisiertes Verfahren
- ✓ Optimierte softwaregesteuerte Ablesung und Auswertung
- ✓ MICRONAUT-STREP Platten sind ab Produktion 24 Monate haltbar bei einer Lagerung bei 15 - 25 °C
- ✓ Eine Packung enthält 40 x 4 Tests, 1l NaCl sowie perforierte Abklebefolien

TAXALISTE:

Enterococcus avium

Enterococcus casseliflavus

Enterococcus durans

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Enterococcus gallinarum

Enterococcus hirae

Streptococcus agalactiae

Streptococcus alactolyticus

Streptococcus anginosus

Streptococcus bovis

Streptococcus constellatus

Streptococcus dysagalactiae ssp. *equisimilis*

Streptococcus equi ssp. *equi*

Streptococcus equi ssp. *zooepidemicus*

Streptococcus equinus

Streptococcus gordonii

Streptococcus intermedius

Streptococcus mitis

Streptococcus mutans

Streptococcus oralis

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus salivarius

Streptococcus sanguinis

Streptococcus sorbrinus

Streptococcus suis

Streptococcus uberis

Streptococcus vestibularis

MICRONAUT-STREP Kurzanleitung



Nur zur *in vitro* Diagnostik

Probenvorbereitung

MICRONAUT-STREP
4 Test/Platte

MCN Software Test „K“ auswählen
Unter Zusatztest bzw. Verdacht:
 β -Hämolyse, Pigmentbildung +/- eingeben

Streptokokken, Enterokokken von Blutagar
ohne Zusätze

Herstellung des Inokulums

McFarland 1 in 5 ml NaCl

Beimpfung

Suspension in 4-Kanal-Reservoir überführen

Je 100 μ l in jede Vertiefung des Tests

Zugabe von 2 Tropfen Paraffinöl


Versiegelung und Inkubation

„MICRONAUT“ Folie (perforiert)

20 - 24 h inkubieren bei 35-37°C

Ablesung

Messung mit dem Photometer

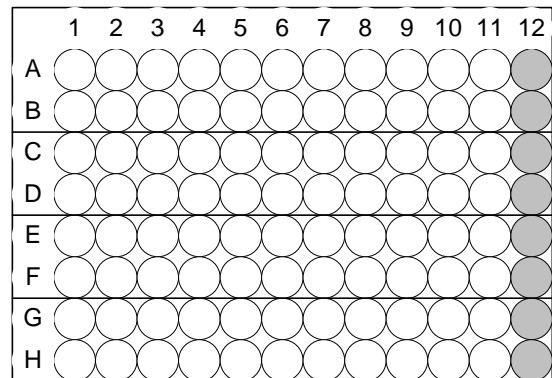

● Paraffinöl
A-H 12

Hersteller:
MERLIN Diagnostika GmbH



Vertrieb:
Genzyme Virotech GmbH

